

HeartSine Trainings-Defibrillatoren mit Fernbedienung

Training von Herzdruckmassage und einem HeartSine Defibrillator

Mit dem Einsatz von Übungsdefibrillatoren können die unterschiedlichen Funktionen, Anzeigen und Sprachbefehle Schritt für Schritt simuliert und der Einsatz realer Geräte praxisnah demonstriert werden. Mithilfe der Fernbedienung kann der Ausbilder das Training unterbrechen, um Erklärungen abzugeben oder unterschiedliche Einsatzszenarien zu demonstrieren.

Für jeden Gerätetyp der perfekte Trainer

Fernbedienung mit Bluetooth-Verbindung, auch für mehrere Trainingsgeräte zu koppeln.

Verschiedene voreingestellte Trainingsszenarien.

Komplett mit Netzteil und Zubehör.

30 Sprachen.



Trainerkassette mit Aufrollmechanismus und Mehrweg-Elektroden

Die mehrfache Anwendung der Trainingselektroden (bis zu 30x) und der wiederaufladbare Defi-Trainer (Netzteil inbegriffen) inklusive der Fernbedienung ermöglichen realistische und kostengünstige HLW-D Trainings.



Optimiert für Herz-Lungen-Wiederbelebung & Defibrillator (HLW-D) Trainings



Optional erhältlich: HLW-Trainingspuppen für Erwachsene, Jugendliche und Babys.

Programmierung der Fernbedienung

Zum Einsatz mehrerer Defi-Trainer in Kombination mit einer Fernbedienung

Anpassung der Fernbedienung

Jeder HeartSine PAD Trainer hat eine eigene Fernbedienung. Dadurch können mehrere Geräte auf engem Raum benutzt werden, ohne dass es zu Interferenzen kommt. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Fernbedienung nicht mehr mit dem Trainer kommuniziert, muss sie möglicherweise erneut an den Trainer angepasst werden.

Vorgehensweise

- USB-Kabel mit PC und dem PAD Trainer verbinden
- Trainer Konfigurationsprogramm (TrainerConfig) starten, dieses können Sie auf unserer Homepage im Footer downloaden <https://medx5.de>
- Im Menü: Fernbedienung Kopplung wählen
- Das Passwort lautet: password
- PAD Trainer vom USB-Kabel trennen und Trainer anschalten (grüne Taste). Die LEDs der Elektrodenanzeige beginnen zu leuchten
- Batterieabdeckung der Fernbedienung entfernen
- Roten Ausschaltknopf auf der Fernbedienung drücken und gleichzeitig eine Batterie entfernen
- Anschließend Batterie wieder einlegen. Die Fernbedienung stellt jetzt eine Verbindung zum Trainer her und bestätigt wird dies mit 12 Signaltönen. Sobald der erste Signaltone hörbar ist, lassen Sie den roten Ausschaltknopf los. Anschließend Deckel des Batteriefaches schließen.
- PAD Trainer schaltet sich aus, die Kopplung ist beendet.



Zu beachten

Sollten Sie beim Einlegen einer neuen Batterie in die Fernbedienung aus Versehen auf den roten Ausschaltknopf kommen, vergibt die Fernbedienung automatisch eine neue ID-Nummer. Sollte dies geschehen, muss eine neue Kopplung mit dem PAD Trainer nach oben genannter Vorgehensweise erfolgen.

NEU. Sheldon Trainingstorso



SAM Trainer App für das Handy

